



PRUEBA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIH 1/2

SD BIOLINE HIV 1/2 3.0

La prueba SD BIOLINE HIV 1/2 3.0 es un inmunoensayo de flujo lateral cualitativo de lectura visual *in vitro* para la detección diferencial de anticuerpos específicos del VIH-1 y VIH-2.

- Altamente sensible incluso a IgM durante la fase inicial de la infección
- Resultado de la prueba diferenciada entre el VIH tipo 1 y 2 por formación de bandas claras (3 líneas)



RESULTADOS EN
10 A 20 MINUTOS



SUERO, PLASMA,
SANGRE ENTERA



1-30 °C
24 MESES



SD BIOLINE HIV 1/2 3.0

RESULTADOS FIABLES Y PRECISOS EN EL MOMENTO

SENSIBILIDAD: 100 % ESPECIFICIDAD: 99,87 %

Identificar ahora a los pacientes seropositivos no solo facilita una vinculación rápida y adecuada a la atención, sino que también ayuda a prevenir una mayor transmisión de la

enfermedad. La robusta sensibilidad y especificidad del SD BIOLINE HIV 1/2 3.0, así como la facilidad de su uso, hacen que esta prueba sea excelente y adecuada para su uso en el momento.

Sensibilidad diagnóstica

TIPO DE VIH	N° DE MUESTRAS ANALIZADAS	SD BIOLINE HIV-1/2 3.0	
		NEGATIVO	POSITIVO
HIV-1	480	0	480
HIV-2	120	0	120
TOTAL	600	0	600 (100 %)

Especificidad diagnóstica


CATEGORÍA	N° DE MUESTRAS ANALIZADAS	SD BIOLINE HIV-1/2 3.0	
		NEGATIVO	POSITIVO
Donantes sanos	500	500	0
	250	250	0
	250	250	0
Posibles interferencias	500	498	2
Total	1500	1498 (99,87 %)	2

Fuente de: Instrucciones de uso CE de SD BIOLINE HIV-1/2 3.0.

FÁCIL DE USAR

1 Agregar una muestra

Pipeta capilar Micropipeta

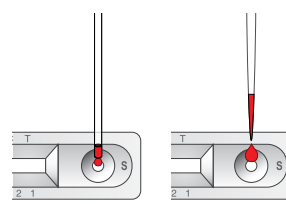

2 Agregue el diluyente de ensayo

Administre **4 gotas** del diluyente de ensayo.



3 Lea el resultado de la prueba en 10-20 minutos

La lectura fuera de este período de tiempo puede dar resultados falsos.



Lea los resultados

NEGATIVO



C 2 1

POSITIVO

VIH-1 Positivo



C 2 1

VIH-2 Positivo



C 2 1

INVÁLIDO



C 2 1



C 2 1

Lea las instrucciones de uso en el envase.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Sensibilidad	100 %
Especificidad	99,87 %
Tipos de muestras	Suero, Plasma (10 µL) o Sangre entera (20 µL)
Vida útil	24 meses a 1-30 °C
Autorización	KFDA, CE

INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	N° DE CAT.	TIPO	TAMAÑO DEL ENVASE
HIV 1/2 3.0	03FK10	Dispositivo	30T/KIT
HIV 1/2 3.0	03FK11	Dispositivo múltiple	100T/KIT
HIV 1/2 FAST 3.0	03FK12	Tira	25T/KIT
HIV 1/2 3.0*	03FK16	Dispositivo	25T/KIT
HIV 1/2 3.0**	03FK17	Dispositivo	25T/KIT
HIV 1/2 3.0	03FK10CE	Dispositivo	30T/KIT
HIV 1/2 3.0	03FK11CE	Dispositivo múltiple	100T/KIT
HIV 1/2 3.0***	03FK16CE	Dispositivo	25T/KIT

(*) Lanceta, pipeta capilar, toallita con alcohol incluidas.

(**) Lanceta de seguridad, pipeta capilar, toallita con alcohol incluidas.

(***) Lanceta, pipeta capilar incluidas.

ABBOTT.COM/POCT

1. La sensibilidad y la especificidad se extraen de las Instrucciones de uso de cada producto.

© 2019 Abbott. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas mencionadas son marcas comerciales del grupo de empresas Abbott o de sus respectivos propietarios. Las fotos que se muestran son solo para fines ilustrativos. Cualquier persona representada en estas fotos es un modelo. 120005481-01, 07/19

